

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – RELÓGIO APGAR DIGITAL






Part Number: 0310010

Descrição

O Relógio Apgar da Viamed é um relógio digital que funciona com uma bateria e com a possibilidade de programação de um indicador sonoro com intervalos de 1,5 e 10 minutos.

O relógio tem um ecrã LCD com grande visibilidade e é facilmente programado utilizando-se a 3 teclas frontais.

Funções das Teclas

Tecla	Funções
	<ul style="list-style-type: none"> Começa a contagem a partir de 00:00. Retorna ao <i>Modo de Contagem</i> enquanto no <i>Modo de Imobilização</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> Entra e sai do <i>Modo de Imobilização</i>. Mostra as “imobilizações” enquanto o tempo actual a decorrer continua a contagem, mas não é mostrado. Saindo do <i>Modo de Imobilização</i> volta ao <i>Modo de Contagem</i>, continuando desde o tempo total que decorreu.
	<ul style="list-style-type: none"> Reprograma o contador, retornando o relógio ao Modo de Suspensão.

Modo de Suspensão

O Relógio Apgar não tem um interruptor ON/OFF. Quando não está a fazer contagens o Relógio Apgar entra em Modo de Suspensão.

No *Modo de Suspensão* o ecrã fica vazio com a excepção de dois pontos (:) a piscar que indicam que o relógio está a funcionar correctamente.

Se o ecrã estiver completamente vazio e sem nenhuns pontos a piscarem, o relógio poderá estar a necessitar que se proceda à substituição das baterias. Deverão substituir-se as baterias anualmente.

Modo de Contagem

Quando o Relógio Apgar começa a contagem, o ecrã conta a partir de 00:00 com intervalos de 1 segundo até ao máximo de 1 hora (59:59 no ecrã), e entrará em Modo de Suspensão automaticamente.

Enquanto faz a contagem, o relógio indicará os intervalos da Pontuação Apgar com sinais sonoros:

1 minuto: 1 sinal
5 minutos: 2 sinais
10 minutos: 3 sinais

Modo de Imobilização

É possível imobilizar o ecrã enquanto o tempo actual continua a contagem em segundo plano; isto é para permitir a gravação do tempo desde o início do ciclo de contagem de um evento específico.

Enquanto o ecrã está imobilizado, os pontos (:) continuam a piscar.

Quando se anula a imobilização, o relógio continua a contagem, continuado a partir do tempo total decorrido.

Se for atingido um intervalo da Pontuação Apgar enquanto o ecrã estiver imobilizado, o relógio emitirá sempre um sinal para indicar esse intervalo, mas manter-se-á no *Modo de Imobilização* até que o utilizador saia desse modo.

Função de reprogramação

A *Função de Reprogramação* permite que se re programe o relógio e que este volte para o Modo de Suspensão.

Substituição das baterias

De modo a obter uma boa performance do equipamento deverá substituir as baterias anualmente.

Se o Relógio Apgar for removido de serviço ou armazenado, deverá sempre retirar as baterias.

Se o LCD piscar entre as mensagens “Lo” e “Batt” é indicativo que a bateria está a descarregar. Quando aparecer esta mensagem, deverá substituir as baterias assim que possível.

Para substituir as baterias, remova o suporte de montagem da parte de trás do relógio utilizando uma chave Allen de 3/16”, e depois utilizando a lâmina estreita da chave de fendas desaperte a cobertura da bateria. Substitua as baterias por umas novas (4 x AA/LR6/MN 1500 1.5V Alcalinas), tendo em atenção a polaridade correcta.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos locais.

Especificações

Dimensões (excluindo o suporte)	142mm (W) x 130mm (H) X 40mm (D)
Peso	551g
Ecrã	LCD 4 dígitos. Altura dos dígitos: 25mm
Requisitos energéticos	Baterias Alcalinas 4 x AA/LR6/MN1500 1.5V
Controles	Start, Freeze/Unfreeze, Reset
Indicações sonoras	1, 5, 10 minutos

Acessórios opcionais

Part Number	Descrição
0320200	Suporte de montagem Medirail
0121199	Montagem articulação giratória
0121200	Clamp de montagem universal

Garantia

A garantia contra defeitos de fabrico é assegurada durante o período de um ano.

Esta responsabilidade é limitada unicamente à substituição e reparação dos produtos e não inclui custos de transporte ou qualquer outro tipo de danos acidentais.

A garantia não cobre danos causados por má utilização, negligência, danos acidentais, ou por reparações efectuadas por entidades não autorizadas pela Viamed.

Informações da Empresa

Viamed Ltd,
15 Station Road
Cross Hills
Keighley
West Yorkshire
BD20 7DT
United Kingdom

Tel: +44 (0)1535 634542
Fax: +44 (0)1535 635582
Email: info@viamed.co.uk
Web: www.viamed.co.uk

