



Viamed Limited - 15 Station Road - Cross Hills  
Keighley - West Yorkshire BD20 7DT - United Kingdom  
Tel: +44 (0)1535 634542 Fax: +44 (0)1535 635582  
Email: [info@viamed.co.uk](mailto:info@viamed.co.uk) Website: [www.viamed.co.uk](http://www.viamed.co.uk)

## **Cappe/Tende monouso per ossigenoterapia**

### **Catalogo da 2310000 a 2310134**

#### **Informazioni generali e messa in opera**

- 1) Rimuovere i pannelli della cappa/tenda dalla confezione.
- 2) Dispiegare i pannelli e rimuovere, se presenti, i dischi di chiusura dagli ingressi da 22 mm per la connessione dei tubi. In alcuni modelli (es., Double-Tent Outer) i dischi di chiusura sono lasciati in loco. In altri modelli sono già rimossi in fabbrica.
- 3) Fissare il pannello posteriore alla struttura della cappa/tenda utilizzando tutti i bottoni automatici (se la cappa è di tipo No Bottom, NICU o Partial Bottom, i bottoni sul lato inferiore del pannello posteriore non sono previsti).
- 4) Nel modello Outer Double-Tent sono presenti sul pannello posteriore tre ingressi da 22 mm per tubi di aspirazione e umidificazione/aerosol. Nota: Tubi, connettori e filtri non sono inclusi nella fornitura.
- 5) La cappa/tenda deve essere assemblata in conformità con i protocolli ospedalieri.

**Nota:** Se la cappa/tenda è fornita di una base, interporre un lenzuolo tra questa e il paziente.

**Nota:** L'uso della cappa deve essere necessariamente accompagnato da operazioni di monitoraggio dell'ossigeno.

**ATTENZIONE:** Prima di posizionare la cappa/tenda sul paziente, assicurarsi che siano stati rimossi i dischi di chiusura e che i bottoni automatici siano correttamente funzionanti.

**ATTENZIONE:** Non fumare, utilizzare apparecchiature elettriche e fiamme libere quando è in corso l'erogazione dell'ossigeno. Possono essere lasciati ad uso del paziente solo giocattoli approvati.

**ATTENZIONE:** È importante operare un regolare controllo della posizione del paziente sotto la cappa.

**CE0086**